


ELLIPTASTISCH EINFACH

INHALIEREN MIT DEM ELLIPTA-INHALATOR.

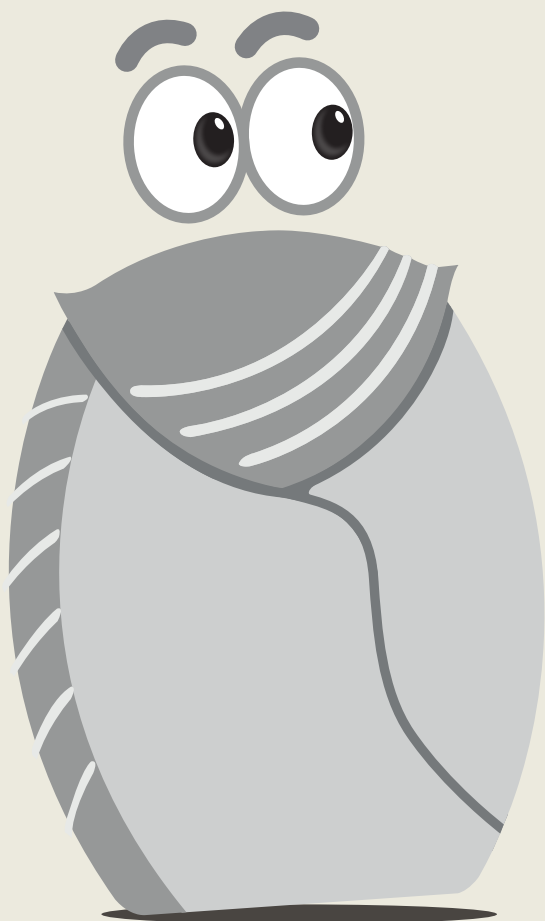

Information
zur **3 Schritt-**
Inhalation mit
Ihrem ELLIPTA

Mundstück Abdeckung



ÖFFNEN



INHALIEREN



SCHLIESSEN

Eine detaillierte Instruktion
finden Sie auf den Innenseiten
bzw. in der Packungsbeilage
Ihres Ellipta-Produktes.



ICH BIN'S – IHR ELLIPTA-INHALATOR

Und darauf sollten Sie beim Inhalieren achten



Ich bin gar nicht grau, sondern so **BUNT**, wie Sie mich kennen. Meine Farbe ist aber fürs richtige Inhalieren egal.



Schritt 1 : ÖFFNEN!

Meine Verschlusskappe soweit nach rechts unten schieben, bis Sie ein „Klick“ von mir hören. Jetzt habe ich alles, was Sie inhalieren sollen in meine Inhalationskammer geladen und bin bereit fürs Inhalieren.*



Vorher aber noch entspannt ein- und tief ausatmen, damit meine Wirkstoffe in der Lunge genug Platz haben, um sich optimal verbreiten zu können.



Information zur **3 Schritt-Inhalation** mit Ihrem ELLIPTA

Mundstück Abdeckung



Dosiszähler

ÖFFNEN

Schritt 2 : INHALIEREN!

Bevor Sie wieder einatmen, mein Mundstück mit den Lippen umschließen und erst jetzt so tief und lange wie möglich einatmen.



So gelangt möglichst viel von dem Pulver, das in meiner Inhalationskammer drin ist, dorthin, wo es hin soll – in Ihre Lunge.



Vermeiden Sie, dass meine Lüftungsöffnungen mit Ihren Lippen oder Fingern abgedeckt werden!



INHALIEREN

Wenn Sie fertig inhaliert haben, versuchen Sie die Luft möglichst lange – zumindest 4 Sekunden – anzuhalten. Danach die Lippen von meinem Mundstück lösen, schließen aber nicht in mich hineinatmen.



Schritt 3 : SCHLIESSEN!

Sie brauchen jetzt nur noch meine Verschlusskappe wieder in die Ausgangsposition zurückschieben.



Noch ein Tipp zum Abschluss: Spülen Sie nach jeder Inhalation den Mund aus, damit sich keine Wirkstoffpartikel im Mund- und Rachenraum festsetzen können.



SCHLIESSEN

Eine detaillierte Instruktion finden Sie auf den Innenseiten bzw. in der Packungsbeilage Ihres Ellipta-Produktes.

*ACHTUNG: Öffnen und Schließen der Verschlusskappe ohne dazwischenliegende Inhalation vermeiden, da jedes Mal eine neue Dosis an Wirkstoff/Wirkstoffkombination in die Inhalationskammer geladen wird!

ELLIPTASTISCH EINFACH

Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat Ihnen als Therapie für Ihr Asthma oder Ihre COPD ein Medikament mit dem Zusatz „ELLIPTA“ (= Bezeichnung für den Inhalator mit dem Sie den Wirkstoff/die Wirkstoffkombination inhalieren) verordnet und dazu diese Information zur korrekten Anwendung des ELLIPTA-Inhalators ausgehändigt.

Bitte lesen Sie diese Informationen zur Anwendung des ELLIPTA-Inhalators, wie auch die Packungsbeilage Ihres Medikamentes, die Sie im Überkarton finden, aufmerksam durch, um eine optimale Anwendung Ihrer Therapie von Anfang an sicherzustellen.



WENN FRAGEN ZUR INHALATION MIT DEM ELLIPTA OFFEN GEBLIEBEN SIND!?

Fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin,
Ihren Apotheker/Ihre Apothekerin
oder scannen Sie diesen QR-Code,
um weitere praktische Tipps für
das korrekte Inhalieren mit Ihrem
Ellipta zu erhalten.

**HIER GEHT ES ZUM
ANWENDUNGSVIDEO:**



INNOVIVA

Ellipta ist eine eingetragene Marke der Unternehmensgruppe GlaxoSmithKline plc.
Ellipta wurde in Zusammenarbeit mit Innoviva Inc. entwickelt.

A. Menarini Pharma GmbH, 1120 Wien, www.menarini.at

AT-ELL-02-01-2026